



軽量  
コンパクト  
サイズ

# ニプロ電子血圧計 NBP-1BLE

## 使用のてびき

1. 無線通信接続(ペアリング)方法
2. 測定結果の送信方法について
3. 測定方法
4. クリーニング方法
5. 電池交換方法
6. 困ったときのトラブルシューティング

# 1. 無線通信接続（ペアリング）方法

- 測定値を自動取り込みする場合に設定します。
- 複数機器をペアリングする場合は、複数の機器を一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。1機ずつ設定してください。

1

測定器の背面に記載されている  
シリアルナンバー末尾6桁を  
控えてください。



(内の番号は  
機器によって異なります。)

シリアルナンバー

F45EAB22075B

末尾6桁

各部の名称



2


ニプロハートラインアプリTOP画面右上の  
メニューボタン(白い線で横3本のもの )  
を押します。



# 1. 無線通信接続（ペアリング）方法

3

「機器接続設定」を選択します。

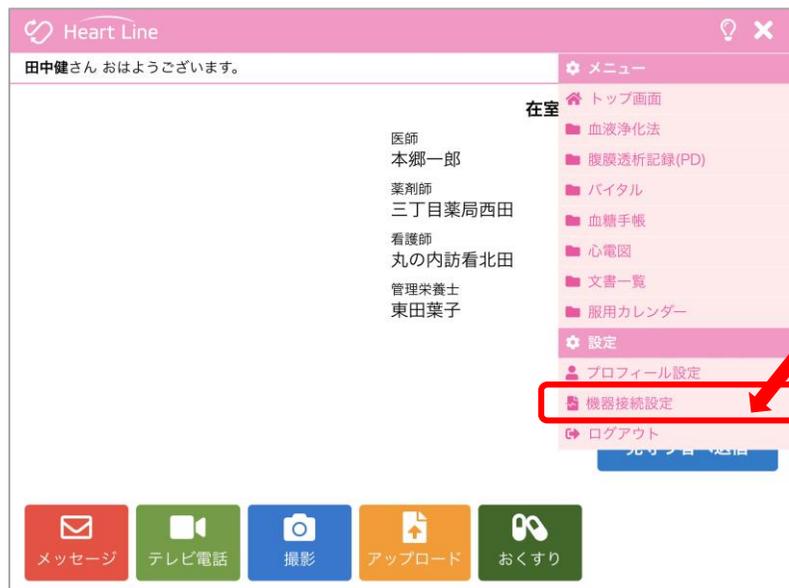

5

測定器の開始／終了スイッチを長押し(3秒程度)するとペアリングモードになります。液晶に「Pr」と表示されます。



4

設定画面が表示されます。



6

未接続機器欄に「電子血圧計 NBP-1BLE」が表示されるので接続ボタンを押します。



# 1. 無線通信接続（ペアリング）方法

7


ペアリング要求のメッセージが表示されます。



（    内の番号は機器によって異なります。）

1 で控えたナンバーと合っていることを確認し、

(背面)

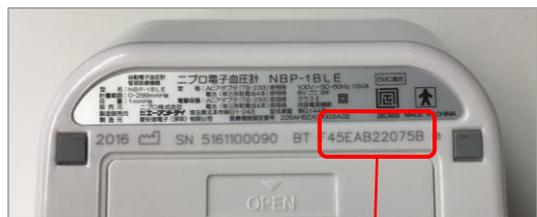

F45EAB22075B

「ペアリング」を押します。



8

接続済み機器欄に表示されます。  
(ペアリング完了です。)



複数機器をペアリングしている時の表示例



# 2. 測定結果の送信方法について

取得した測定値の送信方法は2通りあります。

送信方法の設定については、主治医の指示に従ってください。

## ① 自動で送信(複数機器の測定結果を測定ごとに送信)

「取得したバイタルを自動送信する:



ONにすると緑色に変わります。

各機器で測定すると

	11/20	11/20	11/20	11/20	測定した時刻
SpO2	-	-	98	-	
血圧(上)	-	-	-	120	
血圧(下)	-	-	-	88	
脈拍数	-	-	-	67	
心拍数	-	-	-	-	
体温	-	36.2	-	-	
体重	-	-	-	-	
血糖値	150	-	-	-	

バイタル画面にはこのように表示されます。

## ② 任意で送信(複数機器の測定結果をまとめて送信)

「取得したバイタルを自動送信する:



各機器で測定後



TOP画面に測定結果が表示されます。

**見守り者へ送信** を押します。



送信完了のメッセージが表示されます。

「閉じる」を押します。

	11/22
SpO2	98
血圧(上)	140
血圧(下)	85
脈拍数	78
心拍数	-
体温	36.6
体重	-
血糖値	-

バイタル画面には**送信した時刻**が測定日時として表示されます。

# 3. 測定方法

- 服装は素肌もしくは薄いシャツ1枚で測定してください。
- カフの中心が心臓の高さになるようにしてください。

カフを巻いた部分が心臓より 高い位置 → 低い数値が得ます。  
低い位置 → 高い数値が得ます。

1

カフの輪を広げます。



帯をずらして広げます。

2

カフの輪を腕に通します。



エアホースの口が手首側に来るように腕を通します。

3

上腕に引き上げます。



ホースの口が中指の延長線上に合わせます。

4

巻き上げます。



布ファスナーで固定します。  
(指1~2本入る巻き付け)

測定開始。

# 3. 測定方法

- 背筋を伸ばして姿勢良く座った状態で測定してください。
- 測定中、体を動かしたり、おしゃべりをしないでください。

5

背筋を伸ばして姿勢良く座ります。



6

開始／終了スイッチを短押しすると加圧が始まります。



7

測定結果が表示されます。  
しばらくするとデータが取り込まれます。  
データが取り込まれたらカフを取り外してください。



## 4. クリーニング方法




### 本体・カフ

水または中性洗剤を染みこませた布を硬く絞って拭いてください。

※シンナー、ベンジン等のアルコール溶剤は使用しないでください。

※カフは洗濯したり、ぬらしたりしないでください。

## 5. 電池交換方法

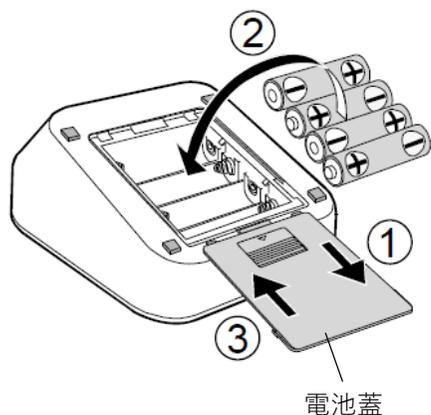

### 手順

- ①電池蓋を矢印の方向にずらし、開けてください。
- ②新しい単3形乾電池4個を(+)と(-)の表示に合わせて入れてください。
- ③電池蓋を矢印の方向にすべらせて押さえ、「カチッ」と音がするまで閉めてください。

### 注意

- 表示部に  マークが点滅した場合は、乾電池を4個同時に新しいものとお取替えください。
- 電池が完全に消耗すると  マークは表示されません。
- 乾電池の寿命は、周囲の温度により変わります。冬場など気温の低いときには短くなります。
- 乾電池は4個同時に4個とも同じメーカーの同じ種類のもので交換してください。
- 加圧中に  が点滅または消えてしまう場合は乾電池を交換してください。

### 電池の種類

単3形乾電池 4本

### 電池残量マーク

	電池は十分残っています。
	電池が残り少なくなっています。
	表示が点滅する場合は、電池が消耗しています。乾電池を交換してください。

# 6. 困ったときのトラブルシューティング

## ペアリングがうまくできない場合

考えられる原因	対処法
電池残量不足	電池を交換してください。（単3形乾電池4本）
ペアリングモードにしている機器が複数台ある	複数の機器を一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。1機ずつ設定してください。
アプリを更新していない	ニプロハートラインアプリを最新のバージョンにアップデートし、端末を再起動してください。
Bluetooth無線通信接続がOFFになっている	設定アプリからBluetooth無線通信設定をONにしてください。
位置情報設定がOFFになっている	設定アプリから位置情報をONにしてください。

## 測定結果が送信できない場合

考えられる原因	対処法
Bluetooth無線通信接続がOFFになっている	設定アプリからBluetooth無線通信設定をONにしてください。
電池残量不足	電池を交換してください。（単3形乾電池4本）
端末の電池残量不足	端末を充電してください。
アプリを更新していない	ニプロハートラインアプリを最新のバージョンにアップデートし、端末を再起動してください。
通信環境が不安定	通信環境の良い場所で再度測定を行ってください。

## その他のお問い合わせ

ニプロハートラインアプリに関するお問い合わせは当社ホームページよりご連絡ください。

ニプロハートラインアプリに関するお問い合わせは  
ニプロホームページから

ニプロハートライン

🔍 検索