



軽量
大型画面

ニプロ非接触体温計 NT-100B

使用のてびき

1. 無線通信接続(ペアリング)方法
2. 測定結果の送信方法について
3. 測定方法
4. クリーニング方法
5. 電池交換方法
6. 困ったときのトラブルシューティング

1. 無線通信接続（ペアリング）方法

- 測定値を自動取り込みする場合に設定します。
- 複数機器をペアリングする場合は、複数の機器を一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。1機ずつ設定してください。

各部の名称



1


お使いの端末のBluetoothをONにし、ニプロハートラインアプリTOP画面右上のメニューボタンを押します。



1. 無線通信接続（ペアリング）方法

2

「機器接続設定」を選択します。

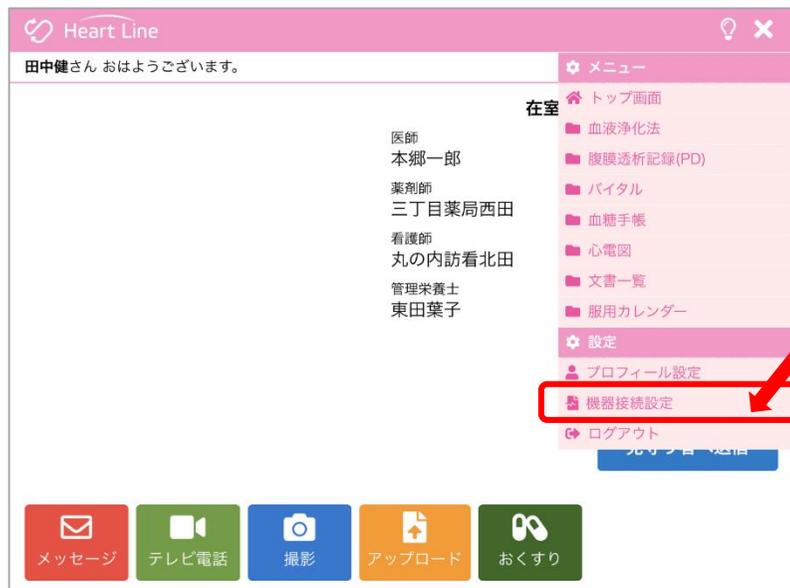

4

カバーをはずし、測定器上面のスキャンボタンを押して電源を入れます。

「Lo」という表示が出ます。



3

設定画面が表示されます。



5

額に向けてスキャンボタンを押し、測定します。



測定例

1. 無線通信接続（ペアリング）方法

6

未接続機器欄に「非接触体温計 NT-100B」が表示されるので接続ボタンを押します。



8

画面が消えたら完了です。



(表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。)

7

接続済み機器欄に表示されます。
(ペアリング完了です。)



複数機器をペアリングしている時の表示例



2. 測定結果の送信方法について

取得した測定値の送信方法は2通りあります。

送信方法の設定については、主治医の指示に従ってください。

① 自動で送信(複数機器の測定結果を測定ごとに送信)

「取得したバイタルを自動送信する: 」のボタンを右にスライドさせてONにします。



ONにすると緑色に変わります。

各機器で測定すると

	11/20	11/20	11/20	11/20	測定した時刻
SpO2	-	-	98	-	
血圧(上)	-	-	-	120	
血圧(下)	-	-	-	88	
脈拍数	-	-	-	67	
心拍数	-	-	-	-	
体温	-	36.2	-	-	
体重	-	-	-	-	
血糖値	150	-	-	-	

バイタル画面にはこのように表示されます。

② 任意で送信(複数機器の測定結果をまとめて送信)

「取得したバイタルを自動送信する: 」のボタンはOFFのままにします。



各機器で測定後



TOP画面に測定結果が表示されます。

見守り者へ送信 を押します。



送信完了のメッセージが表示されます。

「閉じる」を押します。

	11/22	送信した時刻
SpO2	98	
血圧(上)	140	
血圧(下)	85	
脈拍数	78	
心拍数	-	
体温	36.6	
体重	-	
血糖値	-	

バイタル画面には**送信した時刻**が測定日時として表示されます。

3. 測定方法

- 額に髪がかからないようにし、汗は拭きとってください。
- プローブは清潔に保ち、直接触れないでください。
- 携帯電話のような電磁波を発生する機器からは離して使用してください。
- 連続で測定する場合は①②を繰り返します。
- 電源は30秒後に自動でOFFとなります。

1

本体からカバーを外し、
表面から2～3cm
離れた額の中心部分に
プローブを当てます。



2

スキャンボタンを押して
測定を行います。



3

「ピピッ」と鳴ったら
測定値がディスプレイに
表示されます。

下記のディスプレイメッセージが
表示された場合は、通信OFFとなり、
自動取込しませんので再測定して
ください。

Lo
31.9℃以下

Hi
43.1℃以上

【ディスプレイ緑表示】

32.0℃以上
37.9℃以下



【ディスプレイ赤表示】

38.0℃以上
43.0℃以下



4. クリーニング方法



本体

水と中性洗剤の溶液、あるいは70%アルコールで湿らせた布をよく絞って拭いてください。

※シンナー、ベンジン等のアルコール溶剤は使用しないでください。


プローブ

70%アルコールで湿らせた綿棒でやさしく拭いてください。

5. 電池交換方法

手順

電池を交換する際は、必ず電源を切ってから行ってください。

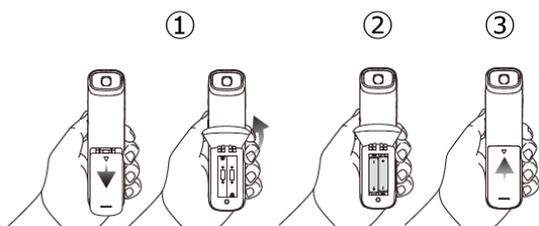

①電池蓋を矢印の方向にずらし、開けてください。

②新しい単4形アルカリ電池2個を(+)と(-)の表示に合わせて入れてください。

③電池蓋を閉めた状態で軽く上から押さえ、「カチッ」と音がするまで矢印の方向に押し込んでください。

注意

- 電池残量不足表示が現れたらすぐに電池を交換してください。
- 本体が濡れている時や湿気の多い場所では絶対に使用および電池交換をしないでください。また、濡れた手で電池交換をしないでください。感電の危険があります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の(+)、(-)を逆にして使用しないでください。

電池の種類

単4アルカリ電池 2本

電池残量マーク

-  ...電池残量が少なくなっています。
-  ...電池残量がありません。

新しい電池と交換してください。

6. 困ったときのトラブルシューティング

ペアリングがうまくできない場合

考えられる原因	対処法
電池残量不足	電池を交換してください。（単4形アルカリ電池2本）
ペアリングモードにしている機器が複数台ある	複数の機器を一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。1機ずつ設定してください。
アプリを更新していない	ニプロハートラインアプリを最新のバージョンにアップデートし、端末を再起動してください。
Bluetooth無線通信接続がOFFになっている	設定アプリからBluetooth無線通信設定をONにしてください。
位置情報設定がOFFになっている	設定アプリから位置情報をONにしてください。

測定結果が送信できない場合

考えられる原因	対処法
Bluetooth無線通信接続がOFFになっている	設定アプリからBluetooth無線通信設定をONにしてください。
電池残量不足	電池を交換してください。（単4形アルカリ電池2本）
端末の電池残量不足	端末を充電してください。
アプリを更新していない	ニプロハートラインアプリを最新のバージョンにアップデートし、端末を再起動してください。
通信環境が不安定	通信環境の良い場所で再度測定を行ってください。

その他のお問い合わせ

ニプロハートラインアプリに関するお問い合わせは当社ホームページよりご連絡ください。

ニプロハートラインアプリに関するお問い合わせは
ニプロホームページから

ニプロハートライン

🔍 検索