



軽量
コンパクト
サイズ

ニプロ医用電子血圧計 NMBP

使用のてびき

1. 無線通信接続(ペアリング)方法
2. 測定結果の送信方法について
3. 測定方法
4. クリーニング方法
5. 電池交換方法
6. 困ったときのトラブルシューティング

1. 無線通信接続（ペアリング）方法

- 測定値を自動取り込みする場合に設定します。
- 複数機器をペアリングする場合は、複数の機器を一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。1機ずつ設定してください。


1

測定器の底面に記載されている
シリアルナンバー末尾6桁を
控えてください。

（ 内の番号は機器によって異なります。）



2


お使いの端末のBluetoothをONにし、
ニプロハートラインアプリTOP画面右上の
メニューボタン  を押します。



1. 無線通信接続（ペアリング）方法

3

「機器接続設定」を選択します。

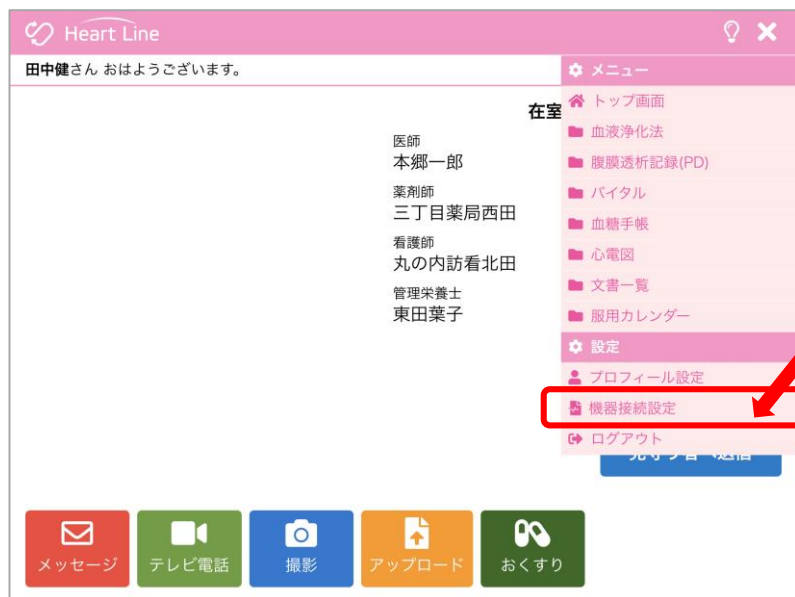

4

設定画面が表示されます。



5

測定器の **スタート** / **ストップ** を長押し(3秒程度)すると室温が表示されます。



6


設定 を押しながら **モード** を短押しするとペアリングモードになります。



1. 無線通信接続（ペアリング）方法

7

未接続機器欄に「**医科向け血圧計 UM-212**」が表示されるので接続ボタンを押します。

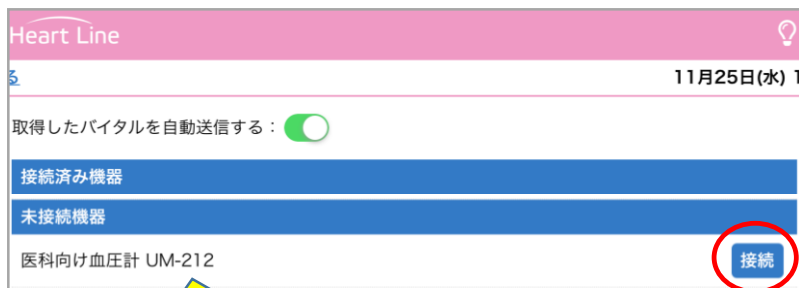

ペアリング要求の型番と、表示名が異なります。

8

ペアリング要求のメッセージが表示されます。



1 で控えたナンバーと合っていることを確認します。



1. 無線通信接続（ペアリング）方法

9

「ペアリング」を押します。




血圧計の表示が変わります。



10

接続済み機器欄に表示されます。
(ペアリング完了です。)

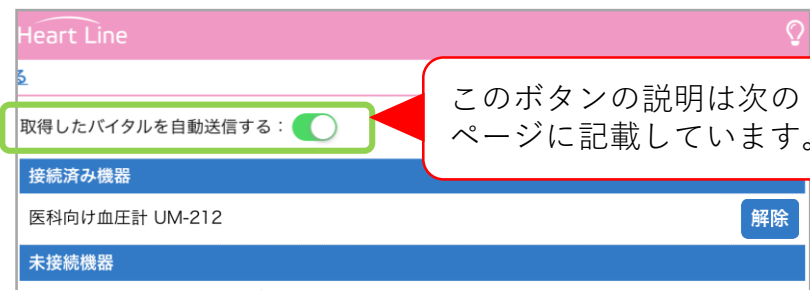

複数機器をペアリングしている時の表示例



2. 測定結果の送信方法について

取得した測定値の送信方法は2通りあります。

送信方法の設定については、主治医の指示に従ってください。

① 自動で送信(複数機器の測定結果を測定ごとに送信)

「取得したバイタルを自動送信する: 」のボタンを右にスライドさせてONにします。



ONにすると緑色に変わります。

各機器で測定すると

	11/20	11/20	11/20	11/20	測定した時刻
SpO2	-	-	98	-	
血圧(上)	-	-	-	120	
血圧(下)	-	-	-	88	
脈拍数	-	-	-	67	
心拍数	-	-	-	-	
体温	-	36.2	-	-	
体重	-	-	-	-	
血糖値	150	-	-	-	

バイタル画面にはこのように表示されます。

② 任意で送信(複数機器の測定結果をまとめて送信)

「取得したバイタルを自動送信する: 」のボタンはOFFのままにします。



各機器で測定後



TOP画面に測定結果が表示されます。
見守り者へ送信を押します。



送信完了のメッセージが表示されます。

「閉じる」を押します。

	11/22	11/22	11/22	11/22	送信した時刻
SpO2	-	-	98	-	
血圧(上)	-	-	140	-	
血圧(下)	-	-	85	-	
脈拍数	-	-	78	-	
心拍数	-	-	-	-	
体温	-	-	36.6	-	
体重	-	-	-	-	
血糖値	-	-	-	-	

バイタル画面には送信した時刻が測定日時として表示されます。

3. 測定方法

- 背筋を伸ばして姿勢良く座った状態で測定してください。
- カフの中心が心臓の高さになるようにしてください。
- 測定中、体を動かしたり、おしゃべりをしないでください。

1

手のひらを上に向け、上腕にカフを巻き付けます。(肘の関節から1~2cm上に)




2

背筋を伸ばして座ります。カフの中心が心臓の高さになるようにします。



3

スタート/ストップボタンを押すと加圧が始まります。

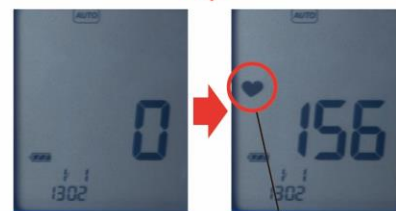


加圧開始

脈拍の検出

4

測定結果が表示されます。しばらくするとデータが取り込まれます。カフを取り外してください。

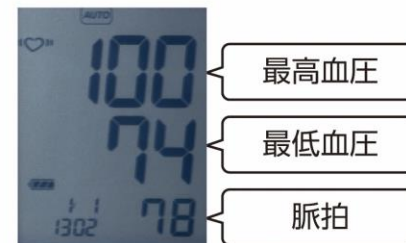

最高血圧

最低血圧

脈拍

4. クリーニング方法

本体・カフ




本体に水をかけたり濡らしたりしないでください。
シンナー、ベンゼン等の有機溶剤は使用しないでください。
本体やカフが汚れたときは、ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとってください。カフを揉んだり、ブラシなどで擦らないでください。

※本体とカフの消毒の際には、下記の消毒液が使用できます。

- エタノール 70 %
 - イソプロパノール 70 %
 - クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5 %
 - ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.05 %
 - 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 0.05 %
- 消毒の際は、消毒液を含んだガーゼか指定の消毒液に浸した布で軽く拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。

5. 充電方法

手順

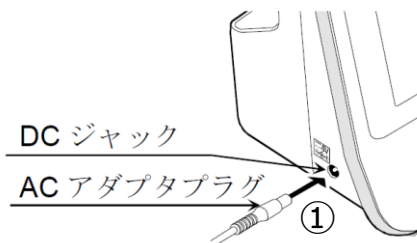


①ACアダプタプラグをDCジャックへ挿入します。


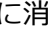
②ACアダプタをコンセントに差し込みます。

※必ず指定のACアダプタを使用してください。

- ACアダプタを本体へ接続すると、充電が開始されます。
- ACアダプタ接続から約4時間で充電が完了します。
- 充電中は、充電マーク(→)が点滅し、温度表示が消えます。
- 充電が完了すると、充電マークが点灯します。

注意

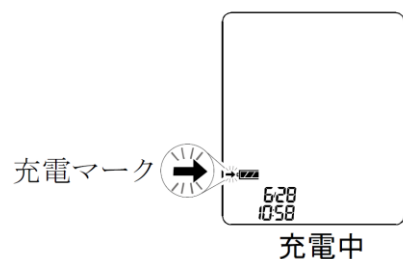

- 液晶表示の  (減電マーク)が点滅したら充電してください。
- 배터리가完全に消耗した場合や、取り付けられていない場合、 (減電マーク)は表示されません。
- 充電後の 배터리での動作時間が極端に短くなった場合、専用 배터리パックの交換が必要です。
- 専用 배터리パックは消耗品です。2年に一度の交換を推奨します。

6. 困ったときのトラブルシューティング

ペアリングがうまくできない場合

考えられる原因	対処法
電池残量不足	バッテリーの充電をしてください。
ペアリングモードにしている機器が複数台ある	複数の機器を一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。1機ずつ設定してください。
アプリを更新していない	ニプロハートラインアプリを最新のバージョンにアップデートし、端末を再起動してください。
Bluetooth無線通信接続がOFFになっている	設定アプリからBluetooth無線通信設定をONにしてください。
位置情報設定がOFFになっている	設定アプリから位置情報をONにしてください。

測定結果が送信できない場合

考えられる原因	対処法
Bluetooth無線通信接続がOFFになっている	設定アプリからBluetooth無線通信設定をONにしてください。
電池残量不足	バッテリーの充電をしてください。
端末の電池残量不足	端末を充電してください。
アプリを更新していない	ニプロハートラインアプリを最新のバージョンにアップデートし、端末を再起動してください。
通信環境が不安定	通信環境の良い場所で再度測定を行ってください。

その他のお問い合わせ

ニプロハートラインアプリに関するお問い合わせは当社ホームページよりご連絡ください。

ニプロハートラインアプリに関するお問い合わせは
ニプロホームページから

ニプロハートライン

🔍 検索